

SurgiClor

DESCRIPCIÓN: **SurgiClor** es un detergente desinfectante clorado de gran capacidad limpiadora y desinfectante en todas aquellas superficies compatibles: suelos, lavabos, mobiliario, bañeras, duchas y superficies lavables en el ámbito sanitario (clínico-hospitalario).

SurgiClor es una formulación que mantiene estable la concentración de hipoclorito, que unido a su capacidad de limpieza, lo hacen un producto adecuado en prácticamente cualquier ambiente.



PROPIEDADES: Capacidad de limpieza
Alta estabilidad del Hipoclorito
Cumple con **NORMA UNE-EN 13697** Bactericida y Fungicida
Puede utilizarse en cualquier superficie lavable, previa verificación

MODO DE EMPLEO: Antes de usar el producto léase atentamente la etiqueta a fin de evitar riesgos innecesarios para las personas y el medio ambiente
Utilizar una dosificación de 35-45 ml por cada litro de agua (3,5-4,5%).
Aplicar mediante fregona o bayeta limpia y aséptica
Mantener el producto entre 5-15 minutos en contacto con la superficie, dependiendo de efecto deseado
En superficies muy sucias, realizar limpieza previa
Dejar secar
No necesita aclarado
Ventilar adecuadamente

CADUCIDAD: 6 meses desde la fecha de fabricación

Nº Registro AEMPS: **912-DES**

ENVASES: Botellas de 1L
Bidones de 5L
Garrafas de 25L

Características:	Estado físico:	Líquido
	Aspecto:	Transparente
	Color:	Incoloro-ligeramente amarillento
	pH:	12-13
	Densidad:	1,0 - 1,1 kg/L
	Contenido en cloro:	5,2%

Recomendaciones: Almacenar entre 5-25°C
Una vez abierto: mantener el producto en el envase original cerrado
Desechar la solución empleada después de cada uso
No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (Cloro)
En contacto con ácidos libera gases tóxicos
EN CASO de exposición o malestar llamar inmediatamente aun **CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA** (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica. **Telf. 91 562 04 20**)

Información Medioambiental: Empresa Certificada por AENOR con N° ES-2011/0662 **ISO 14001:2015** y N° ES-1266/2011 **ISO 9001:2015**

Efectividad Antimicrobiana: Conforme UNE-EN 13697 **SurgiClor** presenta actividad Bactericida a concentración de 3,5% en 5 min.
Conforme UNE-EN 13697 **SurgiClor** presenta actividad Fungicida a concentración de 3,5% en 15 min.

Para el dimensionamiento adecuado de su protocolo y otras aplicaciones no contempladas, consulten a nuestro departamento técnico.